

FUSION

MESO ✓ THERAPY

ISO9001-ISO13485-GMP

@ fusionmeso.iran



ساخت اسپانیا 🇪🇸



اسکن کن
سوال بپرس

رویکردی جدید در مزوتراپی
محصولاتی تخصصی برای تمام درمانها
حداکثر اثر بخشی و ایمنی با کمترین درد و استرس برای بیمار
حداکثر نتایج در کمترین زمان با استفاده از مواد اولیه عالی و فرمول های جدید

@ fusionmeso.iran

HAIR

FUSION MESOTHERAPY

چجوری
خوشحال تری؟
fusionmeso.iran

- درمان ریزش مو
- احیا مجدد موها
- ترمیم و تحریک رشد موها
- مرطوب و خوش حالت شدن موها
- جلوگیری از سفید شدن موها
- درمان نازک شدن موها
- تقویت استحکام مو
- تغذیه و اکسیژن رسانی به فولیکول مو
- بدون هورمون و قابل استفاده برای خانمها
- در درمان آلپوشی آندروژنیک



FUSION

MESO V THERAPY

fusionmeso.iran

F-HAIR



افزایش جریان گردش خون، اکسیژن رسانی خوب و تغذیه عالی پوست سر را به خوبی انجام می دهد و نتایج

زیر را به دنبال دارد:

درمان ریزش مو

تقویت، ترمیم و تحریک رشد مو

افزایش سرعت رشد موها

آبرسانی به موها و خوش حالت و نرم شدن آنها

افزایش استحکام موها


جلوگیری از نازک شدن موها

احیاء موهای آسیب دیده در اثر عوامل خارجی

تقویت و تحریک رشد ابرو و ریش

مواد تشکیل دهنده

- Hyaluronic acid
- Carnosine
- Organic silica
- D-panthenol
- Gingko biloba extract
- Centella extract
- Pyruvic acid
- Biotine
- Trace elements:
(Calcium, iron, zinc, magnesium, copper)

۲ - ۵ میلی لیتر 

هفته‌ای یکبار 

۱۰ میلی لیتر 

۸ - ۱۰ جلسه 

fusionmeso.iran



F-HAIR MEN

دارای فرمولی جدید که بدون داشتن هورمون های معمول، ریزش موی ژنتیکی (آندروژنیک) را در زنان و مردان بدون هیچ عارضه ای کنترل میکند.

این کوکتل با داشتن پپتایدهای مختلف مستقیم بر روی DHT اثر گذاشته، مانع از کوتاه شدن چرخه رشد مو و کوچک شدن فولیکول مو می‌شود.


غلظت پروتئین های ECM در اطراف پیاز مو را بهبود بخشیده و مو محکم و مقاوم می‌شود. در نهایت موهای جدید، ضخیم و با استحکام با رنگ طبیعی دوباره رشد خواهند کرد.

fusionmeso.iran



مواد تشکیل دهنده


- Hyaluronic acid
- Carnosine
- Organic silica
- D-panthenol
- Melilot extract
- Acetyl tetrapeptide-3
- Copper peptide
- IDP2 peptide
- VEGF growth factor
- FGF growth factor



۲ - ۵ میلی لیتر 

هفته‌ای یکبار 

۵ میلی لیتر 



۸ - ۱۰ جلسه 

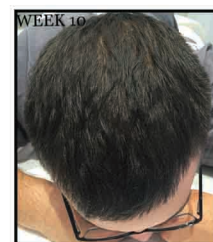

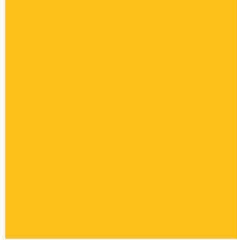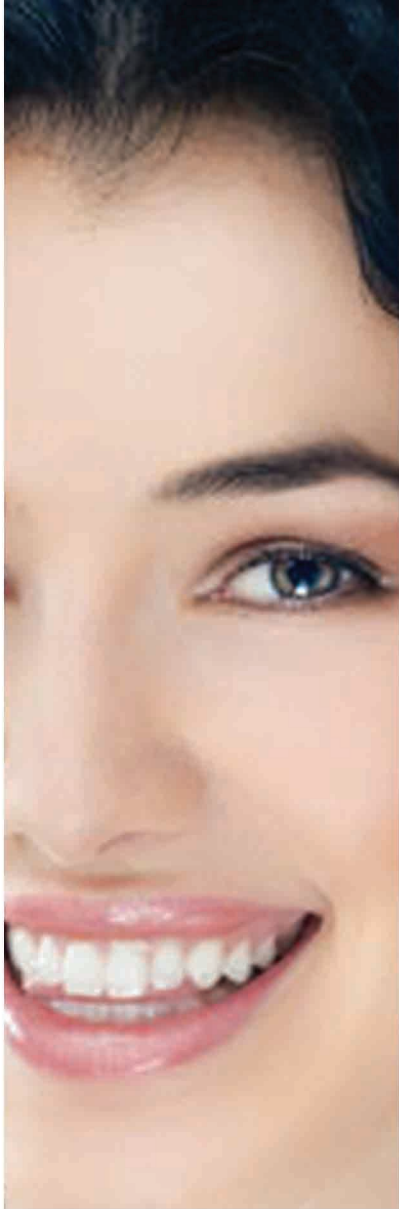

به شما کمک می‌کنیم تا پوستتان را جوان و شاداب نگه دارید.

@ fusionmeso.iran

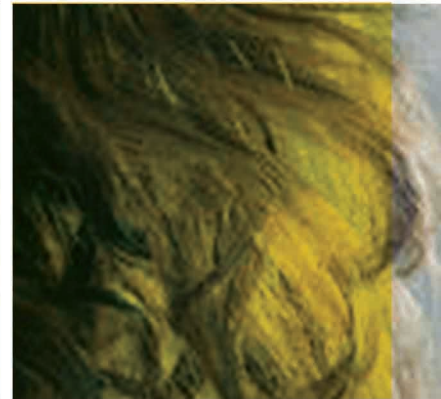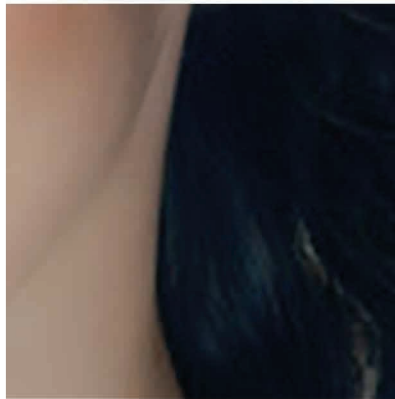

تاثیر زیاد **تغذیه مناسب** بر روی پوست و مو برای همه روشن و واضح است. فردی که تغذیه مناسبی دارد، پوستی شاداب، سفت و جوان خواهد داشت. حال اگر این مواد غذایی به صورت مستقیم به پوست داده شود نتیجه **دوچندان** خواهد بود و در واقع فرایند پیری پوست عقب افتاده، جوان و شاداب می‌مانیم.

همین طور برای افرادی که به دنبال درمان **شل شدگی** و **افتادگی پوستشان** هستند باید بدانند که اولین قدم **تغذیه پوست است**. تا پوست قدرت کافی و لازم برای بازسازی خود را بدست بیاورد و سپس درمان های سفت کردن و لیفت پوست برای آن انجام شود.

مزوفیوژن **تنها برندی است** که به این موضوع مهم توجه کرده و **کوکتل هایی** را فقط به منظور **تغذیه، زنده و قوی کردن پوست** تولید کرده با نام های XFC و XFC+. بعد از استفاده از این کوکتل ها، **کیفیت پوست از هر لحاظ بسیار بهتر شده** و کاملاً آمادگی ورود به درمان های **حرفه ای تر** مثل سفت کردن (XFC+FACE) و لیفت پوست (LIFT+FACE) را دارد **البته اگه نیاز داشته باشد.**

XFC
XFC +
XFC + FACE
LIFT + FACE

F-XFC



@fusionmeso.iran

با داشتن بیش از ۶۳ ماده فعال (مواد مغذی و مولکول های درگیر در چرخه کربس)، یک تقویت کننده و احیاء کننده پوست است و باعث تولید انرژی، پروتئین ها و رشد سلول ها می شود در نتیجه باعث بهبود پوست از جهات مختلف می شود مثل: **کاهش چین و چروک، روشن شدن، سفت شدن، درمان انواع اسکار، و در مجموع کیفیت پوست** را بالا می برد و در واقع پایه و اساس پوست را ترمیم کرده، تغییراتی اساسی در پوست ایجاد کرده، آن را دوباره می سازد و یا از جوانی و شادابی آن نگهداری می کند. در واقع، از آنجا که هیچ رگ خونی در اپیدرم وجود ندارد، سلولها منحصراً با انتشار منفعل پلاسما از درم تغذیه می شوند. با افزایش سن (از ۲۵ سال) عملکرد سیستم گردش خون کم شده و پوست دچار کمبود مواد مغذی و اکسیژن می شود. این کوکتل دقیقاً این کمبود را جبران می کند و مواد مورد نیاز سلول را در اختیار آن قرار می دهد.

مواد تشکیل دهنده

- 6 Minerals
- 23 Amino acids
- 18 Vitamins
- 6 Co-enzymes
- 5 Nucleic acids
- 2 Reducing agents

- Glutathione
- Taurine

۵ - ۲ میلی لیتر

۱۰ میلی لیتر

دو هفته یکبار

۵ جلسه

@fusionmeso.iran



تزریق به روش میکرونیدلینگ

F-XFC+

یک فرمول پیشرفته حاوی اسید هیالورونیک و فاکتورهای رشد (علاوه بر 63 ماده فعال) برای یک **نتیجه قوی تر** نسبت به XFC است.

اپیدرم به دلیل نداشتن مویرگ، از طریق درم و با روش انتشار تغذیه می شود، با افزایش سن در سیستم مویرگی و جریان خون اختلال ایجاد شده و در نتیجه اپیدرم به خوبی تغذیه نمی شود و این باعث ایجاد علایم پیری مثل چین و چروک، کدر شدن پوست و... در پوست می شود. برای حل این مشکل باید همه مواد مغذی لازم برای تامین انرژی و تقویت سلول های پوست در اختیار آن قرار بگیرد که این کار را این کوکتل با قدرت انجام می دهد.

بافت **هیالورونیک اسید** در این محصول نیز به گونه ای طراحی شده تا آزاد شدن مواد فعال در پوست آهسته تر انجام شود و در نتیجه **اثرات طولانی مدت** خواهند بود. این کوکتل فوق العاده باعث **احیاء پوست (تحریک تقسیم سلول های اپیدرمی و فیبروبلاست)** و در نتیجه کاهش چین و چروک، روشن شدن، سفت شدن، درمان انواع اسکار، آبرسانی و در مجموع **افزایش کیفیت پوست** به مراتب قوی تر از XFC می شود.



مواد تشکیل دهنده

- 6 Minerals
- 23 Amino acids
- 18 Vitamins
- 6 Co-enzymes
- Glutathione

- EGF & FGF growth factor
- Hyaluronic acid
- 5 Nucleic acids
- 2 Reducing agents
- Taurine

۵ - ۲ میلی لیتر

۵ میلی لیتر

دو هفته یکبار

۵ جلسه

@ fusionmeso.iran



۴ جلسه درمان با XFC+FACE به روش Superficial Intradermic nappage or papules در ناحیه دکلته



F-XFC+FACE

سفت کننده پوست به صورت تخصصی از بین بردن چین و چروک و خطوط ریز لیفت مختصر در پوست **آبرسان** و برگرداندن حجم پوست

مواد تشکیل دهنده

- DMAE 0,5%
- Organic silicon 5%
- Hyaluronic acid 0.5%

۵ - ۲ میلی لیتر

۱۰ میلی لیتر

دو هفته یکبار

۵ جلسه

شروع درمان با XFC یا XFC+ در ۳ جلسه به عنوان پیش نیاز می تواند اثرات درمان XFC+FACE و LIFT+FACE را ماندگار تر و بیشتر کند.

F-LIFT+FACE

لیفت پوست بدون عمل جراحی

غلظت بالای ۴ پپتاید و ۳ فاکتور رشد و اثر هم افزایی آنها باعث **کنترل رنگدانه ها** و لیفت پوست تا **۵۰ درصد** بعد از **۳ جلسه درمان** می شود. با افزایش سن، اتصال لایه درم و اپیدرم کم شده که این باعث افزایش چین و چروک و شل شدن پوست می شود.

هگزاپپتاید ۱۰ با تقویت پروتئین های DEJ باعث **تقویت اتصال لایه درم و اپیدرم** و در نهایت باعث صاف شدن چین و چروک، لیفت پوست و افزایش خاصیت ارتجاعی پوست می شود. کارسینین با ۴ روش متفاوت و انحصاری باعث افزایش **استحکام و انعطاف** پوست می شود. هیالورونیک اسید با وزن ملکولی ۵۰۰ کیلودالتون، **حجم و رطوبت بالایی** به پوست رسانده و باعث افزایش **سنتز کلاژن** در نتیجه استحکام و بهبود خاصیت ارتجاعی پوست می شود.



مواد تشکیل دهنده

- Hyaluronic acid
- Hexapeptide-10
- Carcinine
- FGF growth factor
- EGF growth factor
- TRX growth factor
- EDP3 biomimetic peptide
- TGP2 biomimetic peptide

۵ - ۲ میلی لیتر

۵ میلی لیتر

دو هفته یکبار


۵ جلسه

@ fusionmeso.iran



۳ جلسه درمان با LIFT+FACE به روش میکرونیدلینگ

F-RADIANCE

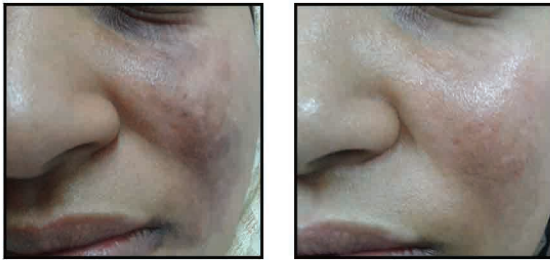

۴ جلسه درمان با Radiance به روش میکرونیدلینگ

چیزی که بسیار مهم است تحریک تولید سلول های جدید پوستی است که RADIANCE این کار را بخوبی انجام می دهد.



درمانی فوق العاده برای کاهش و درمان هر نوع لک تیره پوست بدون ایجاد سوزش و قرمزی (لایه برداری نمی کند) در پوست.

طی سه فرایند:

مهار تولید ملانین

مهار انتقال ملانوزوم با تنظیم پایین ملانوفیلین

مهار آنزیم های تولیدکننده ملانین

مواد تشکیل دهنده

- Glutathione
- Retinol
- Vitamin C
- Acetyl Glycyl
- Beta-Alanine peptide
- TRX growth factor
- TGP2 Biomimetic peptide

۲ - ۵ میلی لیتر



دو هفته یکبار



۱۰ میلی لیتر



۶ - ۱۰ جلسه



@ fusionmeso.iran

F-ANTI-OX

این کوکتل بر اساس ماده طبیعی سوپر اکسید دیسموتاز طراحی شده که سلول ها را در برابر آسیب مولکول های اکسیژن مضر محافظت کرده، بعضی واکنش های شیمیایی مفید را در بدن افزایش داده، باعث درمان چین و چروک، ساخت دوباره بافت پوست (بافت تخریب شده در اثر نور خورشید) و جلوگیری از التهاب ناشی از نور آفتاب در پوست می شود.

ویتامین C و گلووتاتیون، آنتی اکسیدان های قوی برای کاهش تیرگی و لک (رنگدانه ها) و افزایش سطح کلاژن هستند.

سدیم پیرووات داخل این کوکتل انرژی لازم برای تمامی این فعالیت ها را تامین می کند.



بیشترین اثر محافظتی و درمانی در برابر استرس های اکسیداتیو (نور خورشید) را دارد درمانی قوی در برابر فوتوایجینگ (چین و چروک زودرس پوست در اثر نور خورشید) هایپرپیگمنتیشن (لک و تیرگی ناشی از آفتاب) است و در نتیجه روشن کننده ای قوی برای کل صورت است.

@ fusionmeso.iran

مواد تشکیل دهنده

- Super oxide dismutase
- Vitamin C
- Glutathione
- Sodium pyruvate

۲ - ۵ میلی لیتر



۱۰ میلی لیتر



دو هفته یکبار



۶ - ۱۰ جلسه



۲ جلسه درمان با HA و ANTI-OX (تزریق هفته ای یکبار)

۳ جلسه درمان با ANTI-OX (میکرونیدلینگ هفته ای یکبار)

مزایا:

- نشان دادن سریع اثرات یک تا دو ساعت بعد از تزریق
- بدون هیچ عارضه‌ای مانند عوارض احتمالی بوتاکس
- استفاده راحت و مقرون به صرفه بودن
- جلوگیری از تولید چروک های جدید داینامیک
- افزایش قدرت و ماندگاری بوتاکس تا ۳ برابر
- درمان سریع چین و چروک و خطوط ریز
- تولید کلاژن و الاستین و درمان خطوط
- آبرسانی به پوست

FUSION MESO BTX

بوتاکس لایک در برند فیوژن از ترکیب دو نوع ماده پپتاید و هیالورونیک اسید تشکیل شده است.


از داشتن تکنولوژی خاص برای ترکیب این دو ماده بدون کم شدن اثر آنها که بگذریم، مهمترین نکته نتایج جالب و عملکرد خاص آن است.





@ fusionmeso.iran


مواد تشکیل دهنده

- Hyaluronic acid
- Octapeptides
- Pentapeptides

۱۰ میلی لیتر 

۵ جلسه 

۲-۵ میلی لیتر 

۲ ماه بعد از تزریق بوتاکس
یا ۵ جلسه ماهی یکبار 

اثرات دو ماده پپتاید ها و هیالورونیک اسید در کنار هم و با هم در این کوکتل، و چندین بار درمان با آن، باعث از بین رفتن چین و چروک ها، خطوط ریز و جلوگیری از ایجاد چروک های جدید می‌شود.

● چروک های داینامیک پیشانی و خطوط پنجه کلاغی کنار چشم ها:

در دو حالت می توان از این کوکتل استفاده کرد:

۱- بعد از تزریق بوتاکس، که در این صورت قدرت و ماندگاری اثر بوتاکس را سه برابر می کند، چین و چروک ها را درمان کرده و نه تنها از تظاهر دوباره آنها بعد از از بین رفتن اثر بوتاکس، جلوگیری می کند بلکه از ایجاد چروک های جدید نیز ممانعت می کند. (برای درمان چروک های عمیق که با تزریق بوتاکس باز هم اثر آنها وجود دارد از F-HA با روش تزریق خطی استفاده کنید)

۲- چروک ها در حال تشکیل هستند و نیازی به تزریق بوتاکس نیست، این کوکتل آنها را درمان کرده و از ایجاد آنها جلوگیری می کند.

● چروک های دور دهان و چانه:

تزریق بوتاکس در این نواحی با ریسک همراه است، این کوکتل به راحتی و بدون هیچ ریسک ایجاد عارضه، قابل استفاده است. علاوه بر سریع الاثر بودن و از بین بردن چروک ها، آنها را درمان و ایجاد چروک های جدید را به تعویق می اندازد.

● کاهش و درمان چروک و خطوط ریز در کل پوست صورت و از بین بردن منافذ باز

نحوه عملکرد

عملکرد پپتایدها:

بوتاکس، انتشار استیل کولین (Ach) را کاهش داده، (این ماده برای کامل شدن و فعال شدن کمپلکس SNAPS 25 لازم است) و در نتیجه با کاهش تولید کمپلکس SNAPS 25 از انتقال سیگنال های عصبی جلوگیری کرده و عضله فلج می شود.

پپتاید های کوکتل BTX همین کار ولی با کمی تفاوت را انجام می دهند از یک طرف بر سر نشستن در کمپلکس SNAPS 25 با Ach رقابت کرده و در نتیجه باز هم باعث کاهش تولید این کمپلکس شده و از طرفی از ورود یون های کلسیم که باعث اتصال این کمپلکس به دیواره سلول های ماهیچه و تحریک آنها می شود نیز جلوگیری می کند، و در نهایت کاهش بیشتر چین و چروک و خطوط ریز را خواهیم داشت.

عملکرد هیالورونیک اسید:

هیالورونیک اسید در این کوکتل باعث تحریک سنتز کلاژن و آبرسانی به پوست، در نتیجه پر شدن و درمان چروک ها می شود.

مقدار تزریق

- خطوط پنجه کلاغی: ۱ تزریق در هر چین (مقدار تزریق در هر نقطه ۰/۱ سی سی با تکنیک پاپول)
- خطوط پلک پایین: ۳ تزریق در هر چین (مقدار تزریق در هر نقطه ۰/۱ سی سی با تکنیک پاپول)
- پیشانی، خط اخم و دور دهان: (مقدار تزریق در هر نقطه ۰/۱ تا ۰/۲ سی سی- در کل ۵ - ۳ سی سی با عمق ۲ - ۱ میلیمتر)

F-HYDRALIX

نسل جدید مزوژل

تامین رطوبت و حجم بسیار زیاد برای پوست دهیدراته با مکانیسمی فوق العاده این کوکتل در واقع تنها آبرسانی انجام نمی دهد بلکه کاری اساسی تر از آبرسانی را در برنامه خود دارد. این کوکتل آب داخل سلول های سطحی و عمقی پوست را تا ۱۳۱ درصد افزایش داده و با این کار توانایی پوست در جذب مواد مغذی افزایش می یابد و در نهایت پوستی براق، شاداب، بدون چین و چروک و سرزنده خواهیم داشت.

این کوکتل این کار (هیدراته کردن پوست) را با کمک استیل هگزاپتاید ۳۷ انجام می دهد. این ماده با افزایش غلظت پروتئین AQP۳ باعث انتشار آب در لایه های مختلف پوست شده و آب را از لایه های پایینی به لایه سطحی پوست می آورد و سلول های سطحی پوست را هیدراته می کند.

از طرفی در ترکیب با اسید هیالورونیک، لاکتات سدیم و اسید لاکتیک، باعث ایجاد اتصال بین ملکول های آب در پوست شده و از هدر رفت آب از طریق پوست و تبخیر شدن آن و در نتیجه خشک شدن آن جلوگیری می کند.

همه این ها باعث افزایش هیدراتاسیون پوست تا ۱۳۱ درصد بیشتر از هیالورونیک اسید خالص می شود.

مواد تشکیل دهنده

- Hyaluronic acid
- Lactic acid
- Sodium lactate
- Acetyl hexapeptide-37

۵ میلی لیتر  ۵ - ۲ میلی لیتر 
۵ جلسه  دو هفته یکبار 



F-SLIM LIFT



لیفت صورت با کاهش حجم چربی صورت.

کاهش چین و چروک و بهبود حجم پوست.

فرمول F-SLIM LIFT تقویت کننده پوست با بیش از ۶۵ ماده فعال است. این کوکتل بر اساس فرمول معروف F-XFC ایجاد شده که با افزودن کافئین و اسید هیالورونیک پیشرفته تر شده است. کارکرد اصلی این محصول فراهم کردن متابولیت ها در سلول ها برای تحریک متابولیسم آنها (تولید انرژی ، پروتئین و رشد سلولی) و کاهش رسوبات چربی صورت با ایمنی کامل است. که در نهایت صورت لاغرتر و زیباتر به نظر برسد.

مواد تشکیل دهنده

- Hyaluronic acid
- Caffeine
- 6 minerals
- 23 amino acids
- 18 vitamins
- 6 co-enzymes
- 5 nucleic acids
- 2 reducing agents
- Taurine
- glutathione

۱۰-۴ میلی لیتر



۱۰ میلی لیتر



دو هفته یکبار



۵ جلسه



@ fusionmeso.iran

F-HA



دارای وزن مولکولی بالا برای نتایج فوری و طولانی مدت. فیلری بدون پیوند داخلی برای افزایش حجم

پوست و درمان چین و چروک های استاتیک عمیق (دور چشم و دور دهان)

پوست جوان تر ، لطیف تر ، انعطاف پذیر و سفت می شود.

مواد تشکیل دهنده

- Non-reticulated hyaluronic acid high molecular weight at 1.8

۵ - ۳ میلی لیتر



۱۰ میلی لیتر



۴ هفته بعد (در صورت نیاز)



۱ جلسه



@ fusionmeso.iran

F-VENOSTIM




این کوکتل به طور موثری برای بهبود **کوپروزیس (قرمزی پوست)** و **تلانژکتازی (رگ های عنکبوتی)** در صورت استفاده می شود.

این کوکتل با داشتن VEGF، ارگانیک سیلیکون و جینکو باعث افزایش جریان گردش خون از طریق بهبود کیفیت دیوار مویرگ ها و وریدها می شود.

اسید فیتیک از سفت شدن شریان ها و رسوب پلاکت ها جلوگیری می کند. همه اینها همراه تتراپپتاید، **تعداد، وسعت و شدت قرمزی پوست و تلانژکتازی** ناشی از التهاب بیش از حد را کاهش می دهند. معمول ترین روش درمان تلانژکتازی، لیزر است که به سرعت آنها را محو می کند ولی دوباره در جایی دیگر از آن منطقه ایجاد می شود. این کوکتل در واقع با بهبود دیواره مویرگ ها و جلوگیری از سفت شدن شریان ها تا حدود زیادی می تواند ایجاد دوباره آنها را محدود و آن را درمان کند.


مواد تشکیل دهنده

- Phytic acid
- VEGF growth factor
- Ginkgo extract
- Tetrapeptide
- Organic silica

۱-۲،۵ میلی لیتر 

۵ میلی لیتر 

دو هفته یکبار 

۶-۱۰ جلسه 

@ fusionmeso.iran



۶ جلسه درمان با
VENOSTIM
به روش
میکرونیدلینگ

F-EYE CONTOUR




جوانسازی و **آبرسانی** اطراف چشم، بهبود الاستیسیته و کشش پوست، **بهبود خاصیت ارتجاعی و نرمی پوست، بهبود چین و چروک دور چشم، درمان تیرگی اطراف چشم و درمان برآمدگی و ادم زیر چشم.**

این کوکتل با افزایش سنتز پروتئین های ساختاری نگهدارنده اتصال درم و اپیدرم، اتصال آن دو را تقویت کرده و مانع کم شدن خاصیت ارتجاعی پوست و ایجاد چین و چروک جدید می شود و به درمان چین و چروک ها می پردازد.


@ fusionmeso.iran


مواد تشکیل دهنده

- Hexapeptide-10
- Acetyl Tetrapeptide-5
- Vitamin C
- Caffeine
- Hyaluronic acid 0.1%
- Organic silica 2%

۱-۲ میلی لیتر 

۵ میلی لیتر 

هر ۳ هفته یکبار 

۴-۵ جلسه 



درمان با EYE CONTOUR

F-ACN



درمان سریع **آکنه های فعال** و دارای اثر ضد التهابی است، **قرمزی و سوزش پوست**، در اثر آکنه را به سرعت کاهش می دهد. به طور همزمان اندازه **منافذ پوست** را کاهش داده و میزان چربی پوست را کنترل و متعادل می کند.

مواد تشکیل دهنده

- Canadian Willow herb
- Retinol
- Tripeptide-1
- Vitamins B2-B5-B6 and C

۵ - ۲ میلی لیتر

۱۰ میلی لیتر

هفته ای یکبار

۱۰ جلسه

@ fusionmeso.iran

F-MESO MATRIX

مواد تشکیل دهنده

- Hyaluronic acid
- FGF growth factor
- EGF growth factor
- Centella asiatica extract



درمان انواع اسکار (جای زخم و بخیه، اسکار آکنه)، **ترک های پوستی** و چین و چروک عمیق از طریق بازسازی ماتریکس سلولی فاکتور های رشد این کوکتل با تاثیر بر روی سلول های بنیادی، **سلول های جدید** ایجاد می کند تا ظاهر پوست را سالم و جوان تر نشان دهد.

۵ - ۲ میلی لیتر

۵ میلی لیتر

دو هفته یکبار


۱۰ - ۶ جلسه



روش درمان: میکرونیدلینگ



روش درمان: میکرونیدلینگ

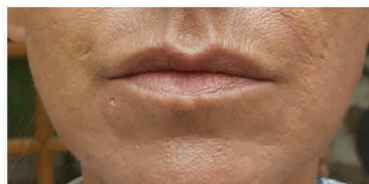

روش درمان: میکرونیدلینگ بصورت تزریق خطی

تزریق بصورت خطی زیر خط خنده همزمان با بیرون کشیدن سرنگ تزریق انجام می شود

یادداشت:

@ fusionmeso.iran



اسکن کن
سوال بپرس

مجموعات مزو کاهش وزن و پروتکل‌ها در ادامه

@ fusionmeso.iran

FUSION

MESO ✓ THERAPY

@ fusionmeso.iran

PPC+، PPC، منهدم کردن سلول های چربی با فسفاتیدیل کولین و داکسی کلات

اولین موادی که برای لاغری و آدیپولیز در ترکیبات مزو می شناسیم فسفاتیدیل کولین و داکسی کلات هستند. چه کاری انجام می دهند؟

در واقع **فسفاتیدیل کولین ذرات چربی را خورد کرده** و آنها را به **موادی محلول در آب تبدیل می کند** برای این کار اول باید وارد سلول های چربی شود اما فسفاتیدیل کولین یک تثبیت کننده دیواره سلولی است و نمی تواند اینکار را انجام دهد.

داکسی کلات به کمک فسفاتیدیل کولین آمده و **دیواره سلول های چربی را ناپایدار کرده، پاره می کند** و حالا **فسفاتیدیل کولین وارد سلول چربی شده و ذرات چربی ذخیره شده** در این سلول ها را خورد کرده و به موادی تبدیل می کند که قابل جذب و دفع به روش های مختلف هستند. پس این دو ماده در کنار هم **کارایی بسیار بالایی** دارند و هر کدام به تنهایی عملکرد پایین تری را نشان می دهند. وقتی سلول های چربی پاره می شوند، فضا در محل بازتر شده و جریان گردش خون هم در منطقه تزریق بهتر می شود.

مواد تشکیل دهنده

- Phosphatidylcholine
- Sodium desoxycholate

۱۰ میلی لیتر  ۱۰ - ۳ میلی لیتر 

۵ - ۳ جلسه  دو هفته یکبار 

F-PPC

مواد تشکیل دهنده

- Phosphatidylcholine
- Sodium desoxycholate
- Organic silicon
- L-carnitine
- IGF1 growth factor

۱۰ میلی لیتر  ۱۰ - ۳ میلی لیتر 

۵ - ۳ جلسه  دو هفته یکبار 

F-PPC+

@ fusionmeso.iran

CARNITIN، انتقال ذرات چربی به میتوکندری

PPC+، نسخه پیشرفته PPC



مواد تشکیل دهنده

- L-carnitine

۱۰ میلی لیتر  ۲ - ۸ میلی لیتر 

۱۰ - ۶ جلسه  دو هفته یکبار 

F-CARNITIN

فکر نکنید همه سلول های چربی در منطقه تزریق بعد از درمان با داکسی کلات و فسفاتیدیل کولین نابود شده اند خیلی از آنها همچنان سالم مانده اند. این سلول ها را با موادی مثل کارنتین مجبور به سوزاندن ذرات چربی ذخیره شده در داخلشان می کنیم، یعنی تولید انرژی و لاغر شدن به طور **همزمان**.

فیوژن، کارنتین را به صورت خالص دارد اما جالب تر اینکه در کوکتل PPC+ کارنتین را در کنار فسفاتیدیل کولین و داکسی کلات گذاشته و با اینکار، **کار چربی سوزی و لیپولیز (بهبود متابولیسم چربی)** را **همزمان** انجام می دهد یعنی هر سلول چربی که نابود نشود باید چربی سوزی انجام دهد.

خوش هیجکل باشی هم



MAGISTRAL، خارج کردن زائدات سلولی

باقیمانده و سرعت دادن به روند کاهش سایز



مواد تشکیل دهنده

- Organic silica
- Artichoke
- Rutin
- Troxerutin
- Coumarin

۱۰ میلی لیتر ۳ - ۱۰ میلی لیتر
 ۵ - ۳ جلسه هفته‌ای یکبار

F-MAGISTRAL

خب حالا بافتی که در آن این مزوهای کاهش سایز را تزریق کرده‌ایم پر از مواد زائد است یعنی همان باقیمانده سلول های منهدم شده. باقی ماندن این مواد زائد در محل تزریق باعث ایجاد ادم زیاد و التهاب محیطی می شود و در نتیجه بعد از چند جلسه دیگر نتایج اولیه بدست نیامده و سرعت کاهش سایز، به شدت کاهش پیدا می کند. برای خارج کردن این مواد زائد دو روش وجود دارد که باید حتما انجام می شدند یکی خوردن آب زیاد و دیگری ورزش منظم و کافی.

اما برند فیوژن پیشنهاد دیگری هم دارد که مطمئن باشیم کار به درستی انجام می شود و این کوکتلی است به اسم MAGISTRAL. این کوکتل **درناژ** را به خوبی انجام می دهد، یعنی این مواد زائد را از محیط خارج کرده یعنی دقیقا مثل سیفون عمل می کند. فرایندی که برای **چندین برابر کردن و کامل کردن فرایند** کاهش سایز واقعا لازم است حتی وقتی که بیمار به ما قول خوردن آب زیاد و ورزش کافی را می دهد باز هم **نباید** از این کوکتل **غافل شد**. تزریق این کوکتل باید ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از تزریق PPC+ یا انجام شود (جلسات یک در میان) به این علت که باید این دو کوکتل فرصت کافی برای انجام وظایفشان را داشته باشد و بعد MAGISTRAL وارد عمل شود و باقیمانده کار آنها را **جارو کند و ببرد**.

@ fusionmeso.iran



F-XBC

مواد تشکیل دهنده

- Vectorized lipase & Hyaluronidase
- Caffeine
- Organic silicon
- L-carnitine & taurine
- Ginkgo biloba
- Cynara
- Melilotus & hydrocotyle extract

۱۰ میلی لیتر ۳ - ۱۰ میلی لیتر
 هفته‌ای یکبار

مواد تشکیل دهنده

- Rutin
- Troxerutin
- Coumarin

۱۰ میلی لیتر ۳ - ۱۰ میلی لیتر
 ۲ هفته یکبار



F-MELIRUTIN

XBC، لیپولیز و درمان انواع سلولیت

XBC، قوی ترین کوکتل درمان انواع سلولیت است که فرایندهای کاهش نمای پوست پرتقالی، افزایش لیپولیز، درناژ و سفت کردن پوست را همزمان انجام می دهد. انجام تمام این فرایندها بطور همزمان نتایج شگفت انگیزی در درمان سلولیت و جلوگیری از تجمع دوباره آن دارد. یکی از علت های ایجاد سلولیت، کاهش و توقف جریان خون مویرگی و در نتیجه افزایش مواد سمی و زائد در منطقه است. MELIRUTIN باعث افزایش جریان گردش خون شده در نتیجه ورود مواد مغذی و اکسیژن به منطقه درمان و خروج مواد زائد از آن تسهیل می شود که استفاده از MELIRUTIN در درمان سلولیت به صورت یک جلسه درمیان با XBC نتایج را سریع تر و بیشتر خواهد کرد.

✳️ برای افرادی که به کافئین حساسیت دارند برای درمان سلولیت می توان از MAGISTRAL یا MUSCLE FIT استفاده کرد.

ورزشکاران حرفه‌ای

F-MUSCLE FIT F-MUSCLE FACTOR

این ترکیبات برای افرادی توصیه می‌شوند که ورزش کردن قسمتی از سبک زندگی آنهاست. در طی درمان ماهیچه‌های هدف سر زنده‌تر، فعال‌تر و قوی‌تر عمل می‌کنند زیرا تمام مواد مغذی مورد نیازشان در دسترس آنها قرار داده می‌شود و علاوه بر چربی سوزی، ماهیچه‌ها افزایش حجم خواهند داشت البته فقط در ماهیچه‌های مورد نظر و بصورت موضعی.

این مزوها در واقع نقش **مکمل‌های ورزشی** را بازی می‌کنند با این مزیت که نیازی به استفاده مداوم از آنها نیست و بعد از اتمام دوره درمان، دستاوردهای شما تا زمانی که ورزش می‌کنید ماندگار هستند و به حالت قبل باز نمی‌گردند.

تبدیل ذرات چربی به گلوکز و تغذیه ماهیچه‌ها

در این حالت ماده غذایی اصلی ماهیچه یعنی گلوکز در اختیار آنها قرار می‌گیرد و در نتیجه ماهیچه برای تامین انرژی و ساخت دوباره خودش گلیکوژن استفاده نمی‌کند.

افزایش حجم و ریکاوری ماهیچه‌ها

این کار را از طریق تاثیر آسپارتیک اسید بر روی غده هیپوفیز و در نتیجه تولید هورمون تستسترون انجام می‌دهد. از طرفی همه مواد مورد نیاز ماهیچه مثل زینک و ویتامین B6 برای ریکاوری سریع تر ماهیچه را در اختیار آن قرار می‌دهد.

خشک کردن (تفکیک عضلات)

این کار وظیفه اصلی MUSCLE FIT است که آب میان بافتی و مواد سمی زیر پوست را از بدن خارج می‌کند.

افزایش حجم ماهیچه‌ها بصورت موضعی

بدون هیچگونه هورمون و کاملاً بی خطر

ریکاوری سریع ماهیچه‌ها

از بین بردن چربی زیر پوستی

قابل استفاده برای هر دو جنس زن و مرد

قابل استفاده برای هر نوع ماهیچه

ماندگاری نتایج بعد از پایان درمان




F- MESO MATRIX

درمان ترک‌های پوستی با تحریک سلول‌های بنیادی و تولید سلول‌های جدید



fusionmeso.iran

قبل و بعد

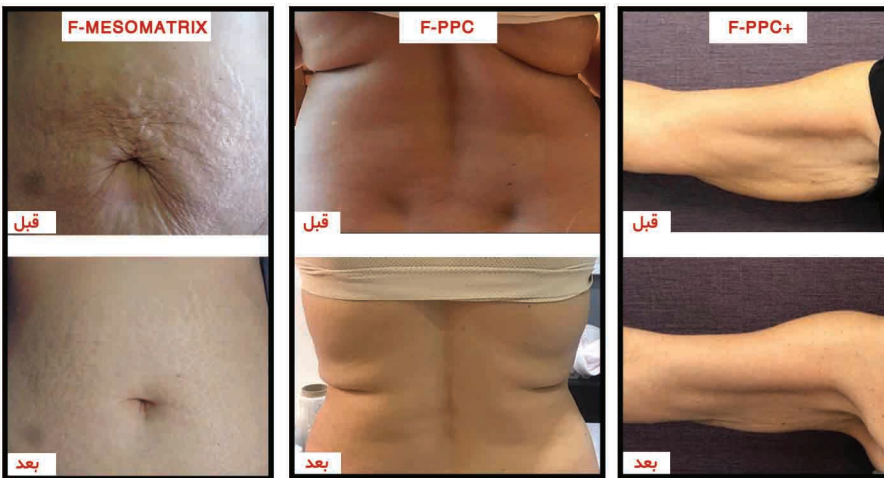

fusionmeso.iran

F- CENTELIX سفت کردن پوست بدن

مواد تشکیل دهنده

- Centella asiatica
- fucus and Ivy extracts

۱۰ میلی لیتر ۳ - ۱۰ میلی لیتر
دو هفته یکبار ۶ - ۱۰ جلسه



- L-glutamine
- L-carnitine
- taurine
- D-aspartic acid
- vitamin B6

۲۰ - ۵۰ میلی لیتر
هفته‌ای یکبار

- Zinc
- Magnesium
- Pyruvic acid
- Plankton extract

۱۰ میلی لیتر
۵ - ۱۰ جلسه



F-MUSCLE FACTOR

- IGF1 growth factor
- Green tea
- Fucus
- Plankton
- Horsechestnut extract
- Organic silica

۲۰ - ۵۰ میلی لیتر
هفته‌ای یکبار ۳ - ۵ جلسه



F-MUSCLE FIT

مواد تشکیل دهنده

fusionmeso.iran

F-SILORG

لیفت و سفت کردن پوست با تحریک مزودرم و ساختار های سلولی پلی ساکاریدی محلول در آب و بدون ضرر برای پوست که با اثرات متفاوتی که دارد نهایتاً داشتن پوستی **سفت و مرطوب** را تضمین می کند. سیلورگ فیوژن **آنتی اکسیدانی قوی** است که دارای اثرات بازسازی و تقویت بافت همبند، **تحریک تولید کلاژن و الاستین** بسیار قوی تر از ویتامین C است.



مواد تشکیل دهنده

- Organic silica 5%

۱۰ - ۳ میلی لیتر



۱۰ میلی لیتر



دو هفته یکبار



۶ - ۱۰ جلسه



@ fusionmeso.iran

F-ARTICHOKE

سم زدایی و تحریک سیستم لنفاوی بر همین اساس، آرتی شوک، در مزوتراپی به عنوان **موثرترین دارو** در درمان سلولیت ادماتو، بویژه در زنانی که **داروهای ضد بارداری** استفاده می کنند، شناخته شده و بطور کلی به منظور کاهش **چربی های موضعی، درمان ادم و سلولیت** استفاده می شود. در صورت مصرف توام با ال-کارتتین، موجب تسهیل دفع چربی ها از طریق ادرار می شود.



مواد تشکیل دهنده

- Artichoke extract

۱۰ - ۳ میلی لیتر



۱۰ میلی لیتر



هفته ای یکبار



۶ - ۱۰ جلسه



F-GINKGO

افزایش جریان گردش خون و ضد التهاب افزایش سنتز کلاژن در دیواره رگها و کاهش نفوذپذیری مویرگها، در نتیجه کاهش اختلالات نارسایی های وریدی

کمک به درمان **سلولیت** به عنوان محرک لیپولیز موضعی در کنار F-XBC
افزایش سرعت روند درمان **ریش مو** در کنار کوکتل های F-HAIR MEN و F-HAIR



مواد تشکیل دهنده

- Ginkgo extract

۵ - ۳ میلی لیتر



۱۰ میلی لیتر



هر ۲ هفته یکبار



۶ - ۱۰ جلسه



@ fusionmeso.iran

مراحل فیوژن تراپی:

- هرگونه مواد آرایشی را از سطح پوست صورت پاک کنید (F- Deep cleanser)
- بهتر است از یک لایه بردار سطحی استفاده شود (F- Hyaluronic peel)
- بی حس کردن پوست با کرم‌های بی حسی
- انجام درمان طبق پروتکل‌های گفته شده (میکرونییدلینگ، الکتروپوریشن، مزو)
- استفاده از ماسک استریل فیوژن (Meso-T mask)
- استفاده از Smart mix

راهنمای انتخاب سرسوزن

سرسوزن مناسب برای درمان ریزش مو

- 30G/4mm
- 31G/4mm

سرسوزن مناسب برای کاهش سایز

- 30G/13mm
- 31G/13mm

سرسوزن مناسب برای جوانسازی صورت و بدن

- 30G/4mm
- 31G/4mm

راهنمای ترکیب مزوها

برای ترکیب محلول های مزو فیوژن باید اسمولاریته محلول نهایی بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ mOsm باشد.
اسمولاریته هرکدام در پایین آورده شده است:

F-HA & F-HA+ 350 mOsm

F-ANTI-OX 350 mOsm

F-CARNITINE 1.500 mOsm

F-DMAE 550 mOsm

F-VITAMIN C 1.500 mOsm

F-ARTICHOKE 300 mOsm

F-SILORG 350 mOsm

F-VITAMIN ACE 350 mOsm

F-GINKGO 300 mOsm

به عنوان مثال:

0.1 ml of F-VITAMIN C + 0,5 ml of F-DMAE + 2.5 ml of F-HA + 1,9 ml of F-SILORG

= (1500*0,1+550*0,5+350*2,5+350*1,9)/5=394 mOsm

This cocktail is isotonic



پروتکل های درمان

نام محصول	محل درمان	روش درمان	عمق تزریق	بافت هدف	سلول هدف	فواصل درمانی	حجم تزریق در هر جلسه درمان
XFC	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیو لینگ	۰ - ۲ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast Keratinocytes	جلسه ۴ - ۲ هر ۲ هفته یکبار	۲ - ۵ ml (۰.۰۳" - ۰.۰۵ cc per point)
XFC+	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیو لینگ	۰ - ۲ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast Keratinocytes	جلسه ۴ - ۲ هر ۲ هفته یکبار	۲ - ۵ ml (۰.۰۳" - ۰.۰۵ cc per point)
XFC+FACE	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیو لینگ	۰ - ۲ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast Keratinocytes Myocytes (muscle cells)	جلسه ۵ هر ۲ هفته یکبار	۲ - ۵ ml
LIFT+FACE	صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیو لینگ	۰ - ۲ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast Keratinocytes	جلسه ۵ هر ۲ هفته یکبار	۲ - ۵ ml (۰.۰۳" - ۰.۱ cc per point)
SLIM LIFT	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیو لینگ	۱ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast Keratinocytes Adipocytes	جلسه ۵ هر ۲ هفته یکبار	۲ - ۵ ml
BTX	پیشانی، خطوط پهنه کلانگی دور دهان	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیو لینگ	۱ - ۲ mm	Superficial medium derm	Myocytes (muscle cells)	۲ ماه بعد از تزریق بوتاکس یا ۵ جلسه ماهی یکبار	۲ - ۵ ml (۰.۰۳" - ۰.۱ cc per point)
HYDRALIX	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیو لینگ	۱ - ۲ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast Keratinocytes	جلسه ۵ هر ۲ هفته یکبار	۲ - ۵ ml
VITAMIN C	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیو لینگ	۰ - ۰.۵ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast Keratinocytes Melanocytes	جلسه ۱۰ - ۶ هر ۲ هفته یکبار	۱ ml در ترکیب با ۴ml نرمال سالین

* نگهداری هر ۳ - ۶ ماه یکبار

پروتکل های درمان

نام محصول	محل درمان	روش درمان	عمق تزریق	بافت هدف	سلول هدف	فواصل درمانی	حجم تزریق در هر جلسه درمان
RADIANCE	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ	۰ - ۰,۲ mm	Epidermis	Melanocytes Keratinocytes	جلسه ۱۰ - ۶ هر ۲ هفته یکبار	۲ - ۵ ml (۰,۲ - ۰,۵ cc per point)
VENOSTIM	صورت	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ	۰ - ۰,۲ mm	Superficial derm	Endothelial cells	جلسه ۱۰ - ۶ هر ۲ هفته یکبار	۱ - ۲,۵ ml
EYE CONTOUR	دور چشم	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ	۰,۲ - ۰,۵ mm	Superficial derm	Endothelial cells Fibroblast	جلسه ۵ - ۴ هر ۳ هفته یکبار	۱ - ۲ ml
PERFECT LIPS	لب	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ	۰,۵ mm خط لب ۰,۱ mm روی لب	Dermis Adipose tissue	Adipocytes, Fibroblast Endothelial cells	جلسه ۴ - ۲ هر ۲ هفته یکبار	۱ ml
HA	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ	۲ - ۴ mm	Dermis	Fibroblast	جلسه ۱ ۴ هفته بعد در صورت نیاز	۳ - ۵ ml
DMAE	صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ	۱ - ۲ mm	Dermis	Fibroblast, Myocytes	جلسه ۱ ۴ هفته بعد در صورت نیاز	۲ - ۵ ml
ANTI - OX	صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ	۰ - ۰,۵ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast, Keratinocytes Melanocytes	جلسه ۱۰ - ۶ هر ۲ هفته یکبار	۳ - ۵ ml
VITAMIN ACE	دست، صورت گردن و دکلته	مزو، الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ	۰ - ۰,۵ mm	Epidermis Superficial dermis	Fibroblast, Keratinocytes Melanocytes	جلسه ۱۰ - ۶ هر ۲ هفته یکبار	۳ - ۵ ml
ACN	صورت	الکتروپوریشن، میکرونیچ لیدینگ (بهترین روش الکتروپوریشن است)	۰ - ۰,۵ mm			جلسه ۱۰ هفته ای یکبار	

آکنه فعال: پاکسازی و لایه برداری پوست و سپس استفاده از ACN بصورت مالشی | نداشتن آکنه فعال: میکرونیچ لیدینگ

پروتکل های درمان

نام محصول	محل درمان	روش درمان	عمق تزریق	بافت هدف	سلول هدف	فواصل درمانی	حجم تزریق در هر جلسه درمان
PPC (Adipolyse)	شکم، پهلو، ران و باسن، پشت کتف، بازو و غبغب	مزو	۶-۱۰ mm در هر نقطه فاصله ۲cm	Adipose	Adipocytes	۵-۳ جلسه هر ۲ هفته یکبار	۳-۱۰ ml
PPC+ (Adipolyse)	شکم، پهلو، ران و باسن، پشت کتف، بازو و غبغب	مزو	۶-۱۰ mm در هر نقطه فاصله ۲cm	Adipose	Adipocytes	۵-۳ جلسه هر ۲ هفته یکبار	۳-۱۰ ml
XBC (Lipolyse, cellulite Body)	بدن، غبغب، سلولیت	مزو	۴-۶ mm سلولیت لیپولیز ۶-۱۰ mm	Deep dermis Adipose tissue	Adipocytes	۵-۱۰ جلسه هفته‌ای یکبار	۳-۱۰ ml
MAAGISTRAL (BODY DRAIN)	بدن	مزو	۱.۵-۲.۵ mm	Superficial dermis Connective tissue	Adipocytes Fibroblast	۵-۳ جلسه هفته‌ای یکبار	۳-۱۰ ml
MUSCLE FIT	بدن	مزو	۱-۲ mm	Superficial dermis Connective tissue	Adipocytes	۵-۳ جلسه هفته‌ای یکبار	۵-۲۰ ml
MUSCLE FACTOR	بدن	مزو	۶-۱۰ mm	Deep dermis	Myocytes (muscle cells)	۵-۱۰ جلسه هفته‌ای یکبار	۵-۲۰ ml
MELIRUTIN	بدن صورت و مو	مزو	۱-۲ mm	Superficial dermis	Endothelial	۶-۱۰ جلسه هر ۲ هفته یکبار	۳-۱۰ ml
CENTELIX	بدن	مزو	۱-۲ mm	Superficial dermis Epidermis	Fibroblast Keratinocytes	۴-۱۰ جلسه هر ۲ هفته یکبار	۳-۱۰ ml

پروتکل های درمان

نام محصول	محل درمان	روش درمان	عمق تزریق	بافت هدف	سلول هدف	فواصل درمانی	حجم تزریق در هر جلسه درمان
CARNITINE *	بدن	مزو الکتروپوریشن، میکرونیدلینگ	۲ - ۴ mm	Dermis	Adipocytes	۶ - ۱۰ جلسه هر ۲ هفته یکبار	۸ml + ۲ml نرمال سالین تزریقی
GINKGO *	بدن، صورت و مو	مزو الکتروپوریشن، میکرونیدلینگ	۱ - ۲ mm	Superficial dermis	Fibroblast Keratinocytes Endothelial cells	۶ - ۱۰ جلسه هر ۲ هفته یکبار	۳ - ۵ ml
ARTICHOKE * (BODY DRAIN)	بدن	مزو الکتروپوریشن، میکرونیدلینگ	۲ - ۴ mm	Dermis	Adipocytes	۶ - ۱۰ جلسه هفته ای یکبار	۳ - ۱۰ ml
SILORG *	بدن، صورت، گردن، دکلته	مزو الکتروپوریشن، میکرونیدلینگ	۱ - ۲ mm <small>۰.۵cc در هر نقطه به منظور سفت کردن پوست</small>	Dermis	Fibroblast	۶ - ۱۰ جلسه هر ۲ هفته یکبار	۳ - ۱۰ ml
MESO MATRIX	صورت، گردن، دکلته بدن	الکتروپوریشن، میکرونیدلینگ	۱ - ۲ mm	Epidermis, Superficial & medium dermis	Fibroblast keratinocytes	۶ - ۱۰ جلسه هر ۲ هفته یکبار	۱ - ۵ ml
HAIR *	سر، ریش، ابرو	مزو الکتروپوریشن، میکرونیدلینگ	۱ - ۲ mm	Superficial dermis	Fibroblast Follicle cell	۸ - ۱۰ جلسه هفته ای یکبار	۲ - ۵ ml <small>(۰.۳cc - ۰.۵cc per point)</small>
HAIR MEN *	سر	مزو الکتروپوریشن، میکرونیدلینگ	۱ - ۲ mm	Superficial dermis Hair follicles	Fibroblast Follicle cell	۸ - ۱۰ جلسه هفته ای یکبار	۲ - ۵ ml <small>(۰.۳cc - ۰.۵cc per point)</small>

* این مزو ها را می توانید بصورت خاص استفاده کرده و یا با رعایت اسمولاریته گفته شده ترکیب و تزریق کنید.


* دارای جلسات نگهداری هر ۲ - ۴ ماه یکبار

MESOMASK ANTI-OXYDANT

این تکنیک نتایج Meso lift را افزایش می دهد. قبل از مزو لیفت، ترکیب HA و Vitamin ace و Meso T-mask را بر روی پوست گذاشته، بعد از ۲۰ دقیقه پوست را تمیز کرده و مزو لیفت را انجام دهید.

محصولات:

F-XFC + F-HA + MESO-T MASK

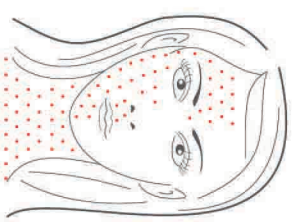


MESOLIFT

مزوتراپی ایدرمیک یا میکرونیدلینگ
۳ - ۶ جلسه هر ۲ هفته یکبار

محصولات:

F-XFC FACE / F-DMAE / F-LIFT+ FACE

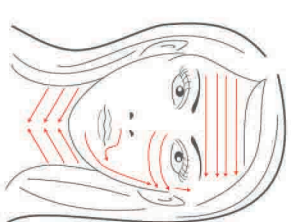


MESO EYES

جوانسازی، لیفت، ضد التهاب
پاپول در درم سطحی

محصولات:

F-EYE CONTOUR / F-SILORG / F-VITAMIN ACE
F-VITAMIN A / F-MELLIRUTIN / F-GINGKO

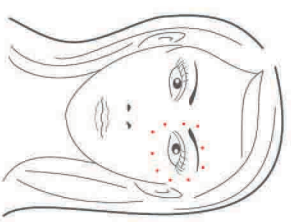


FILLING MESOLIFT

تزریق بصورت پاپول از بین بردن خطوط ظریف و آبرسانی بالای پوست

۳ جلسه ماهی یکبار

محصولات:

F-XFC+ FACE / F-XFC+ / F-MESOMATRIX /
F-LIFT+ FACE

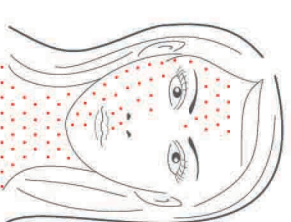

FIRMING MESOLIFT


نکته مهم در FIRMING MESOLIFT تولید کلاژن و فیبروز است. محصولی که استفاده می کنیم نباید سرعت فیبروز را کاهش دهد بنابراین از محصولات ضد التهاب و ویتامین ها استفاده نمی کنیم.

تزریق خطی: تزریق در طول خطوط فرضی تصویر انجام شود و بعد از پایان تزریق ماساژ داده شود.

۳ جلسه ماهی یکبار

محصولات:

F-LIFT+ FACE / F-MESOMATRIX

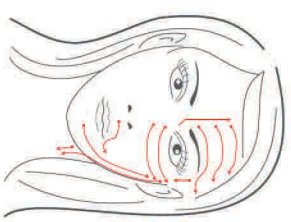

MESO REVITALIZATION

روش کلاسیک (تزریق یک قطره در هر نقطه)

فاصله نقاط ۱ سانتیمتر


عمق ۱-۲ میلیمتر

مناطق: صورت، گردن، دست، بدن

۴-۲ جلسه هر ۲ هفته یکبار

محصولات:

F-XFC / F-XFC+ / F-VITAMIN ACE / F-VITAMIN C
F-VITAMIN B COMPLEX / F-VITAMIN A

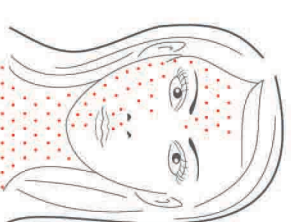


MESO LINES

تزریق خطی در زیر رینکل ها، سوزن را با زاویه ۴۵ درجه در عمق ۲ - ۳ میلیمتر وارد کنید و همزمان با بیرون کشیدن سوزن، مزو را تریق کنید.

۳-۲ جلسه هر ۳ هفته یکبار

محصولات:

F-HA / F-DMAE / F-MESOMATRIX / F-XFC+ / F-BTX

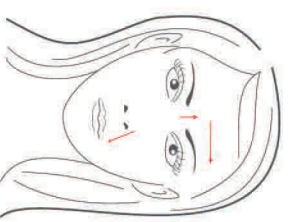

LIPOLIFT

تزریق عمقی ۶ - ۷ میلیمتر


۳ - ۶ جلسه هفته ای یکبار

برای نتایج بهتر با جلسات lipo drain (magistral, artichoke)

تزیق عمقی ۶ - ۷ میلیمتر

محصولات:

F-XBC / F-VITAMIN C / F-SILORG / F-PPC / F-PPC+

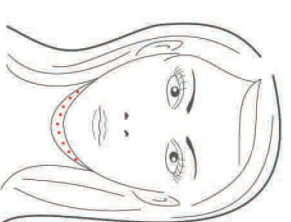

MESO HAIR

افزایش استحکام و کیفیت موها، درمان مناطق با حجم کم مو
۸ - ۱۰ جلسه هفته ای یکبار

محصولات:

F-HAIR / F-HAIR MEN / F-VITAMIN B۵ / F-MELLIRUTIN




MESO ACNE

مزوتراپی ایدرمیک
در این تزریق باید کمترین آسیب به پوست وارد شود بنابراین با
زاویه ۷۵ درجه ورود سوزن انجام می شود.
۲ - ۴ جلسه هر ۲ هفته یکبار

محصولات:

F-ACN / F-VITAMIN B COMPLEX / F-VITAMIN C
F-VITAMIN ACE / F-VITAMIN A

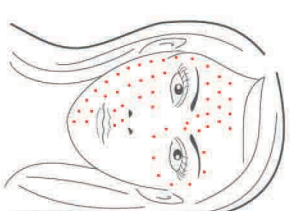

MESO LIPOLYSIS


رهسازی محتوای چربی موجود در سلول چربی و در نتیجه کوچک

شدن بافت چربی

تزریق نقطه ای در عمق ۴ - ۶ میلیمتر با فاصله ۲ سانتیمتر
مقدار تزریق در هر نقطه ۰/۲ سی سی
۲-۴ جلسه هر ۳ هفته یکبار
با جلسات lipodrain بصورت یک جلسه در میان انجام شود.

محصولات:

F-XBC / F-CARNITINE / F-SILORG / F-MELLIRUTIN

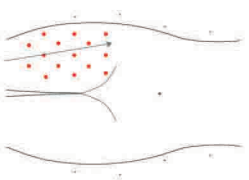


MESO CELLULITE

۲ - ۴ جلسه هر ۲ هفته یکبار
دو نوع تزریق باید انجام شود:
۱- مزو آنژی سلولیت عمق ۴ - ۶ میلیمتر
اثر این تزریق ۴ روز بعد مشخص می شود.
۲- تزریق محصولات drainage در عمق ۱/۵ تا ۲ میلیمتر
اثر این تزریق ۱۵ روز بعد مشخص می شود.

محصولات:

F-XBC / F-SILORG / F-GINGKO / F-MELLIRUTIN
F-ARTICHOKE

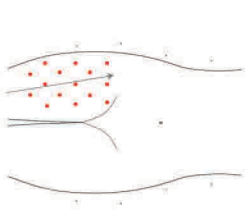


MESO MATRIX

درمانی برای کاهش و بهبود آسیب های وارد شده به بافت
cutaneous

۶ جلسه هر ۲ هفته یکبار
تزریق ها باید دقیقاً در امتداد ترک پوستی یا اسکار انجام شوند
تکنیک های میکرونیویدینگ
محصولات:

F-MESOMATRIX / F-SILORG

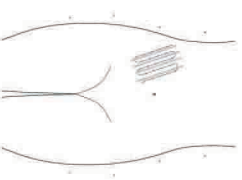


MESO ADIPOPOLYSIS

منهدم کردن سلول های چربی
تزریق نقطه ای در عمق ۷ - ۱۲ میلیمتر با فاصله ۲ سانتیمتر
مقدار تزریق در هر نقطه ۰/۲ سی سی
۲-۴ جلسه هر ۳ هفته یکبار
با جلسات lipodrain بصورت یک جلسه در میان انجام شود.

محصولات:


F-PPC / F-PPC+ / F-CARNITINE / F-SILORG

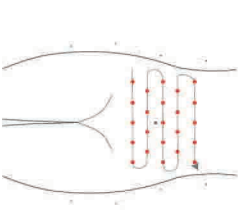

MESO BODY DRAIN

تزریق در لایه درم سطحی
فاصله نقاط ۲ سانتیمتر
عمق ۱/۵ - ۲/۵ میلیمتر
زاویه ورود سوزن: ۴۵ درجه
محصولات:


F-MAGISTRAL / F-ARTICHOKE

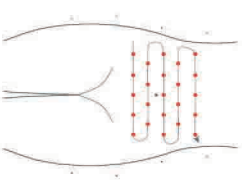

MESO BODY FIRM

تزریق نقطه ای در لایه درم ۰/۵ سی سی در هر نقطه
۴ - ۶ جلسه هر ۲ هفته یکبار
محصولات:

F-CENTELIX / F-SILORG

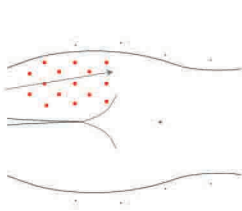

SMART MIX

میکرونییدلینگ بدون قرمزی، التهاب و سوزش پوست


میکروامولسیونی که با ترکیب کردن آن با مزوی مورد نظر خودتان، می توانید کرمی استریل و ضد التهاب تهیه کنید و بعد از انواع درمان های پوستی مثل لایه برداری، میکرونییدلینگ، پیلینگ و ... بر روی پوست بمالید.




مزایا:

- کنترل التهاب، قرمزی و سوزش پوست
- جلوگیری از ورود آلودگی به پوست
- به صورت یک لایه تا زمان شستشو بر روی پوست می ماند
- استریل نگه داشتن پوست تا زمان شستشو
- ادامه جذب ترکیبات مزو توسط پوست تا زمان شستشو
- آبرسانی برای پوست
- جلوگیری از خشک شدن پوست و نیاز کمتر پوست به انواع کرم های آبرسان بعد از درمان


1

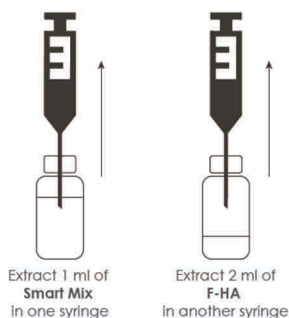


2

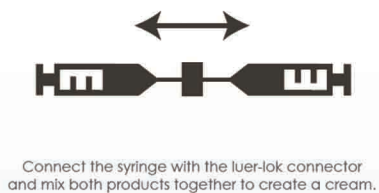

3

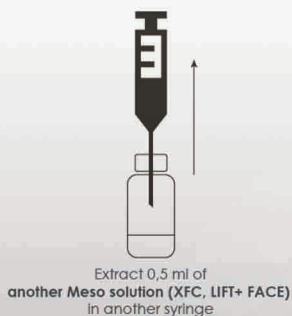

4

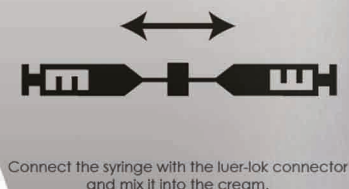

مواد تشکیل دهنده اسمارت میکس

- Natural emulsifier
- Skin emolient

روش استفاده:

HA, SMART MIX و مزوی مورد نظران را در سه سرنگ ۳ سی سی به صورت جداگانه بکشید. سرنگ ها را با کانکتور به هم متصل کرده و با حرکات رفت و برگشتی پیستون سرنگ، مواد را به خوبی با هم ترکیب کنید. در نهایت کرمی استریل به دست می آید.

این کرم را **مستقیماً** بعد از درمان‌هایی مثل میکرونیدلینگ، الکتروپوریشن، پیلینگ، لایه برداری و ... روی پوست بمالید و اجازه دهید ۸ - ۴ ساعت یعنی **تا زمان شستشوی صورت** بر روی پوست بماند.

در نظر داشته باشید که دیگر نیازی به استفاده از کرم های مختلف بعد از اتمام درمان نیست. کرم های ترمیم کننده پوست یا آبرسان بنا به تشخیص پزشک بعد از شستشوی صورت استفاده شود.

مقدار مصرف برای هر جلسه:

Smart Mix : 0.5-1 mL
HA : 0.5 – 2 mL
Meso solution : 0.5 – 2 mL

• در فرمولی که تهیه می کنید همیشه مقدار Smart mix برابر یا کمتر از مواد دیگر باشد.

• مقدار بیشتر HA در ترکیب باعث غلیظ تر و کرمی تر شدن آن می شود و مناسب افرادی است که پوست به آبرسانی بیشتری نیاز دارد. به دلیل اینکه Smart mix **خاصیت آبرسانی هم دارد**، در مواقعی که پوست رطوبت کافی دارد می توانید HA را از فرمول خود حذف کنید.

• نوع مزو را بر اساس نوع درمان می توانید از مزوهای:

جوانساز (XFC, XFC+FACE, LIFT+FACE)

درمان جوش (ACN)

مزوی دور چشم (EYE CONTOUR)

ویتامین ها (Vitamin ACE, Vitamin C)

ضد لک (Radiance, Anti ox)

مزوهای درمان ریزش مو (Hair, Hair men) استفاده کنید.

• برای درمان های آبرسان، می توانید فقط از ترکیب Smart mix و HA استفاده کنید.

تهیه انواع ماسک: مقدار HA را بیشتر از Smart mix و Meso solution در نظر بگیرید. روش استفاده به اینصورت است که بعد از یک لایه برداری سطحی ماسک را بر روی پوست مالیده و بعد از ۳۰ دقیقه آن را تمیز کنید.

خصوصیات ویژه و قوانین استفاده از محصولات فیوژن

- هدف اصلی فیوژن به دست آوردن بالاترین نتایج با کمترین میزان درد برای بیمار است بنابراین فرمول مزو ها به گونه ای طراحی و تولید شده اند که با روش هایی ساده و کم درد مثل: میکرونییدلینگ و الکتروپوریشن، بتوانید بالاترین نتایج را به دست آورید. اما اگر بیمار تزریق را ترجیح می دهد، برایش انجام شود.
- محصولات فیوژن با روش فیلتراسیون استریل شده اند و از آب WATER FOR INJECTION WFI برای تولید آنها استفاده شده (فیوژن یکی از سه برندی است که در دنیا ازین روش برای استریل و تولید محصولاتش استفاده می کند) بنابراین کاملا استریل و قابل انتقال به داخل پوست با روش های مختلف انتقال ترکیبات (میکرونییدلینگ، الکتروپوریشن، مزو و...) هستند.
- PH محصولات بین ۶/۸ تا ۷/۴ است، که این برای مایعات بیولوژیک بسیار ضروری است.
- در تولید کوکتل ها به عمق تزریق و مکانیسم عمل ماده فعال در لایه های مختلف دقت شده است بنابراین به منظور داشتن حداکثر نتایج مزوتراپی و داشتن درمان هایی بدون درد، طبق پروتکل عمل کنید.
- دقیقا طبق پروتکل های درمانی استفاده شوند.
- کوکتل ها به اندازه کافی قوی هستند و نیازی به ترکیب آنها نیست.
- اسمولاریته کوکتل ها دقیقا مشابه اسمولاریته پلاسما طراحی شده اند. ترکیب هر ماده ای به جز نرمال سالین تزریقی با کوکتل ها، موجب تغییر اسمولاریته آنها و در نتیجه تخریب یا دهیدراته شدن سلول های پوست می شود.
- برای ترکیب مزوهای خالص، طبق فرمول ارائه شده عمل کرده تا در نهایت کوکتلی ایزوتونیک تهیه کنید.
- در تمامی کوکتل های فیوژن، ترکیبات فعالی به ویژه اسید هیالورونیک با غلظت بسیار بالا استفاده شده است، پس لطفا به شرایط نگهداری (دمای ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور خورشید و در جای خشک) ذکر شده روی بسته بندی ها دقت کنید.



چرا فیوژن بخریم؟

اصالت:

هر ویال فیوژن دارای شناسنامه منحصر به فرد می باشد که شما می توانید از طریق بارکد و شماره سریال ساخت روی محصول، متوجه اصالت کالا شوید. مسیر هر ویال بعد از خروج از کارخانه تا مصرف قابل پیگیری است.

کیفیت:

فیوژن با دارا بودن میزان ۹۰ درصد رضایت مشتری و همچنین گواهینامه های CE اروپا، ISO13485، ISO9001 و استانداردهای GMP برای تولید در اروپا، همواره دارای محبوبیت بالا در بین برندهای اروپایی و آمریکایی نزد مصرف کنندگان این محصول معروف بوده است. هم اکنون فیوژن به عنوان یک برند معتبر و محبوب در بیش از ۵۵ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا و کشورهای توسعه یافته اروپایی و آسیایی عرضه می گردد.

تنوع:

دهها خط تولید و بیش از ۴۰ نوع کوکتل و داروی خاص برای مزوتراپی و دستگاه های اختصاصی مزوتراپی، فیوژن را به بزرگ ترین و حرفه ای ترین تولید کننده در عرصه مزوتراپی در دنیا تبدیل کرده است.


پیشرو در علم و تکنولوژی:

امروز فیوژن به واسطه بهره مندی از دانشمندان و نوابغ دنیا در علم داروسازی، تبدیل به یک شرکت پیشرو در ثبت فرمول های کوکتل های مزوتراپی گردیده است. کوکتل هایی همچون PERFECT LIPS (مزولب)، HYDRALIX (با اثر آبرسانی ۱۳۱ درصد قوی تر از HA) و MUSCLE FIT و MUSCLE FACTOR (برای تفکیک و افزایش حجم عضلات ورزشکاران) نمونه ای کوچک از محصولات پیشرو و منحصر به فرد فیوژن می باشد.

PERFECT LIPS

جوانسازی لب ها

@ fusionmeso.iran

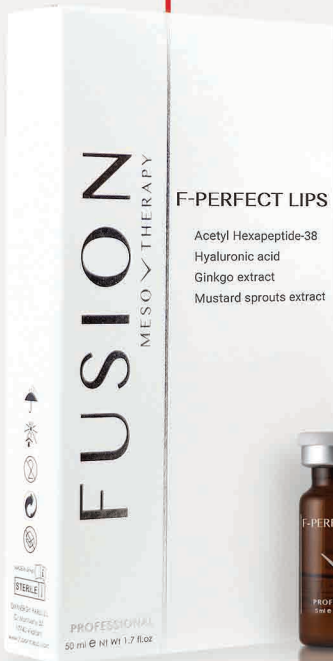

F-PERFECT LIPS

Acetyl Hexapeptide-38
Hyaluronic acid
Ginkgo extract
Mustard sprouts extract



افزایش آدیپوژنز و در نتیجه افزایش قوام لب ها

درمان و جلوگیری از چین و چروک، خشکی و پوسته شدن لب ها
بهبود رنگ لب ها از طریق افزایش جریان گردش خون

مواد تشکیل دهنده

- Hyaluronic acid
- VEGF growth factor
- Ginkgo extract
- Extract of organic mustard sprouts
- Acetyl Hexapeptide-38

۱ میلی لیتر



۵ میلی لیتر



دو هفته یکبار



۴ جلسه



قیمت:

با توجه به نگاه حمایتی مجموعه آپایرون به مقوله محیط زیست،
نسخه حاضر از آخرین سری نشریات چاپی آپایرون می باشد و
زین پس نسخه های الکترونیکی آنها انتشار خواهد یافت.

@ fusionmeso.iran